

Fiche de renseignements pour le paludisme

- **Si possible : Ponction capillaire** douce au bout du doigt sur le côté latéral après désinfection de la pulpe. Ne jamais piquer le pouce.

Faire :

- **2 frottis minces** : déposer une goutte de sang au bout de la lame. Placer une lame propre à 45° contre la lame support, laisser diffuser le sang le long de la lame par capillarité et étaler le sang d'un coup sec, mais régulier sur la lame. Laisser sécher la lame.
- **1 goutte épaisse** : recueillir une grosse goutte de sang au milieu d'une lame.

Défibriner rapidement la goutte de sang en tournant régulièrement de manière circulaire pendant 1mn avec le coin d'une lame sans dépasser 1,5 cm de diamètre. Cesser l'opération avant que le frottis ne commence à sécher.

- **Ponction veineuse** sur un tube avec anticoagulant (EDTA) **systematiquement**.

Scan par :

PRELEVEMENT :

RENDU RESULTAT :

Etiquette dossier

Préleveur :

Date :

Heure prélèvement :

	Résultats 1 (date heure et paraphe)	Résultats 2 (date heure et paraphe)	Saisie Hexalis (date heure et paraphe)	Vérification de saisie (date heure et paraphe)
Test Rapide				
Frottis				
Goutte épaisse				

Renseignements cliniques

Accès fébrile oui non

Fièvre oui (Température :.....) non

Séjour en zone impaludée :

Pays :

Date de retour :

Durée du séjour :

Prophylaxie oui (Nom :.....) non

Traitements éventuels + dates :

Contrôle de coloration : Frottis = Goutte épaisse=

Frottis= teinte beige rosée pour les hématies ; caractéristiques de la chromatine (mottée pour les polynucléaires et les lymphocytes). Goutte épaisse= hématies lysées, fond rosé ; granulations azurophiles des polynucléaires + chromatine mottée.

(Date heure Paraphe)