



Cas particulier des enfants en bas âge - recueil d'un échantillon urinaire

- A effectuer avant ou à distance de tout traitement antibiotique.
- Utilisation d'un collecteur stérile URINOCOL (fourni par le laboratoire sur demande)
- Nettoyer soigneusement la peau qui doit être propre et sèche.
- Détacher le revêtement qui protège l'adhésif.
- Appliquer en vérifiant la bonne adhérence.
- Dès la miction terminée, le collecteur est retiré.
- Ne pas laisser en place plus de 30 minutes. Passé ce délai, si l'enfant n'a pas uriné, le dispositif est éliminé et remplacé par un neuf.
- Enlever la poche délicatement et pour assurer une bonne étanchéité lors du transport et éviter les fuites, coller l'adhésive face contre face et renforcer éventuellement avec un sparadrap.
- Placer la poche directement dans un flacon stérile à bouchon rouge sans transvaser l'urine.
- Identifier ou faire identifier le flacon avec nom, prénom, date de naissance. Noter date et heure du recueil.

Température et délais de conservation :

- Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais (Il peut être conservé 24 heures entre 2°C et 8°C) ou 2 heures à température ambiante (15°C à 25°C).