



Collections fermées, suppurations

Renseignements cliniques souhaitables :

- Nature du prélèvement et site prélevé.
- Antibiothérapie en cours.

Matériel utilisé :

- Ecouvillon E-swab avec milieu de transport Amies (bouchon rose clair).
- Seringue et flacon stérile type ECBU.

Prélèvement :

- Pour une collection (prélèvement réalisé par le clinicien) : ponction à la seringue et transfert dans un flacon stérile type ECBU.
- Pour une suppuration : prélèvement à l'écouvillon.

Température et délais de conservation :

- Pour un prélèvement à la seringue : 2 heures à température ambiante- acheminer le plus rapidement possible au laboratoire.
- Écouvillon E-swab bouchon rose : température ambiante (15°C-25°C) ou 2°C-8°C pendant 48 heures.