
 Laboratoire FORTÉBIO UNILABS	Laboratoire FORTE BIO		Code : INST ORG PRL 04 Version : 001 Date d'application : 10/12/2021
	Instructions	Révision : 0	Page 1 sur 1
Auteur : CORNILLEAU Suzi		Vérificateur : MENAUT Celine, SOULES Faustine	Approbateur : FRIEDLING Marc

Instruction CONDITION DE TRANSFERT DES SELLES PAR LES LABORATOIRES TRANSMETTEURS

Transfert dans les plus brefs délais sur milieux de transport.
Délai avant transfert 12h entre 2 et 8 °C

Port de gants obligatoire

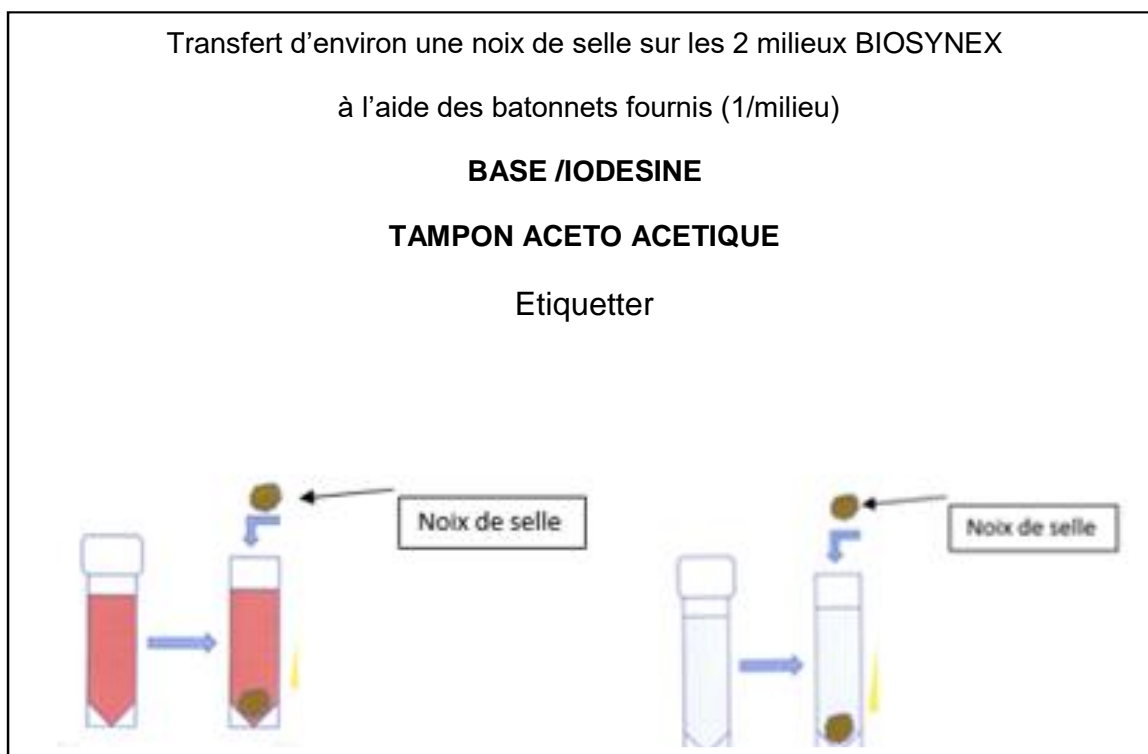

ENVOYER FLACON DE SELLES (examen macroscopique) + 2 MILIEUX de transport
Conservation de la selle et des 2 milieux entre 2 et 8 °C en l'attente de transfert.
Acheminer dans les 72h au laboratoire .

Remarque :

Le laboratoire ne réalise pas la recherche de cryptosporidies et microsporidies.
Le laboratoire ne réalise pas le test de Baermann.

Les milieux pour la conservation des parasites sont fournis par le laboratoire exécutant et peuvent être commandés par téléphone auprès du LABM FORTEBIO au **0558909181** (service microbiologie).