

Transfert dans les plus brefs délais sur Fécal swab
Délai avant transfert 48h entre 2 et 8 °C

Transfert sur écouvillon FECAL SWAB

Sous le PSM, port de gants obligatoire

Retirer l'écouvillon et le tube du sachet.

Sélectionner les portions glaireuses et/ou teintées de sang et/ou purulentes pour le prélèvement.

Plonger l'écouvillon dans l'échantillon à 3 endroits différents.

Effectuer une rotation complète afin que toute la surface de l'embout soit teintée et retirer l'écouvillon

Eliminer tout résidu macroscopique de matières fécales de l'embout et de la tige en pressant fermement l'embout contre la paroi du flacon. NE PAS TROP CHARGER L'ECOUVILLON

L'écouvillon n'est ni une cuillère, ni une pelle ! Ne pas l'utiliser comme tel.

Casser l'écouvillon dans le tube, au niveau de la partie sécable Bien refermer le tube, en vissant le bouchon au maximum.

Etiquetter et transférer sur le plateau technique avec les étiquettes supplémentaires



ENVOYER FLACON DE SELLES + Fécal swab

Conservation le fécal sawb entre 2 et 8 °C en l'attente de transfert.

Acheminer dans les 72h au laboratoire .

Remarque :

Le laboratoire ne réalise pas le test de Baermann.

Les écouvillons fécal swab sont fournis par le laboratoire exécutant et peuvent être commandés par téléphone auprès du LABM AQUIBIO au **0558909181** (service microbiologie).