



O
R
D
R
E

D
E

P
R
E
L
E
V
E
M
E
N
T

N'hésitez pas à consulter notre catalogue d'analyses sur : https://my-unilabs.fr		CONDITIONS PRE-ANALYTIQUE SPECIFIQUES		AUTUN ☎:03-85-52-04-74/ ☎:03-85-86-39-40	LE CREUSOT ☎:03-85-73-02-60/ ☎:03-85-73-02-69	MONTCEAU-LES-MINES ☎:03-85-57-10-75/ ☎:03-85-58-04-61	CHATEAU CHINON ☎:03-86-85-18-82/ ☎:03-86-85-24-20	HOTEL DIEU ☎:03-73-55-04-30/ ☎:03-73-55-04-34
DELAI	TEMPERATURE							
	TUBE DE PURGE							
	TUBE CITRATE	2H	AMBIANT	✱	ACTIVITE ANTI-XA ET TCA AVEC TRAITEMENT HNF (Calciparine...)			
		4H	AMBIANT	✱	TCA SANS TRAITEMENT HNF, FACTEUR V			
		6H	AMBIANT	✱	ACTIVITE ANTI-XA avec TRAITEMENT HBPM (Lovenox, Fragmine...)			
		24H	AMBIANT	✱	TP/INR, D-DIMERE, FIBRINOGENE,			
	TUBE SEC NB : Prélever 2 tubes si dosage de : ☎ Marqueurs, ☎ Hormonologie ☎ Sérologies, ☎ Allergies, ☎ Auto-immunité	3H	AMBIANT	☎	PSA LIBRE			
		4H	AMBIANT	☎	LITHIUM, DIGOXINE			
		6H	AMBIANT	☎	ALLERGIE : ALLERGENE, RAST, IGE TOTALES, PHADIATOP			
		8H	AMBIANT	☎	AUTO-IMMUNITE : AUTO-ANTICORPS			
		24H	AMBIANT	☎	BILAN THYROÏDIEN : TSH, T3L, T4L			
				☎	ELECTROPHORESE/IMMUNO-ELECTRO DES PROTEINES			
				☎	HORMONOLOGIE : FSH, LH, CORTISOL, PROLACTINE, OESTRADIOL, B-HCG			
				☎	MARQUEURS : NT-proBNP, ACE, AFP, PSA, CA 125, CA 15-3, CA 19-9			
				☎	MEDICAMENTS : DEPAKINE, VANCOMYCINE, GENTAMYCINE			
				☎	PROFIL PROTEIQUE : IGA, IGG, IGM, PREALBUMINE			
				☎	VITAMINES : VIT D, VIT B12, ACIDE FOLIQUE (VIT B9)			
				☎	SEROLOGIES VIRALES, PARASITAIRES, BACTERIENNES			
	TUBE HEPARINE NB : Prélever 2 tubes si dosage de TROPONINE, PCT	1H	SUR GLACE	✱	LACTATES (TUBE VERT BAGUE NOIR SANS GEL)			
		4H	AMBIANT	✱	POTASSIUM (K), CPK			
		6H	AMBIANT	✱	LDH, CO2 (RESERVE ALCALINE),			
		8H	AMBIANT	✱	TROPONINE, PCT			
		24H	AMBIANT	✱	CHIMIE COURANTE : CALCIUM, PHOSPHORE, CHOLESTEROL, HDL, LDL, TRIGLYCERIDES, ACIDE URIQUE, UREE, CREATININE, MAGNESIUM, FER, CAPACITE DE SATURATION, TRANSFERRINE, FERRITINE, NA, CL, ALCOOLEMIE, PROTEINES, ALBUMINE, CRP, BILIRUBINE,			
				✱	ENZYMES: AMYLASE, LIPASE, GGT, ALAT/GPT, ASAT/GOT, PHOSPHATASE ALCALINE			
	TUBE EDTA NB : Prélever 2 tubes si dosage autre que NF seule	1H	SUR GLACE	✱	AMMONIEMIE			
		6H	AMBIANT	✱	NF, VS, BNP, RETICULOCYTES			
		24H	AMBIANT	✱	PLAQUETTES , RAI, COOMBS DIRECT, GROUPE SANGUIN, PTH, KLEIHAUER,			
		72H	AMBIANT	✱	HBA1C			
	TUBE FLUORURE	24H	AMBIANT	✱	GLYCEMIE			

 SELAS ACM BIO- Unilabs	CONSIGNES A RESPECTER POUR L'ACHEMINEMENT DES ECHANTILLONS BIOLOGIQUES A TEMPERATURE AMBIANTE	Ref : MU-ENR-434-01 Version : 01 
---	--	---

En période hivernale et si la température extérieure est $\leq$ à 8°C

- Ne pas conduire les vitres ouvertes.
- La température ambiante du véhicule doit se situer autour de 20°C.
- En l'absence de chauffage, acheminer les échantillons au laboratoire dans un délai inf à 1h30.

En période estivale et si la température extérieure est $\geq$ à 36°C

- Placer toujours la mallette à l'abri du soleil.
- Ne pas conduire les vitres ouvertes.
- Mettre la climatisation dans le véhicule afin que la température ambiante du véhicule se situe autour de 20°C.
- En l'absence de climatisation, acheminer les échantillons dans un délai inf à 45 mn.

Ces consignes font suite à une étude de variations de température de transport.