

FEUILLE DE DEMANDE D'EXAMEN CORONAVIRUS (SARS-CoV-2), COVID-19 par PCR

PRELEVEMENT SALIVAIRE POUR LA RECHERCHE DU COVID-19 PAR PCR

Le prélèvement doit **IMPERATIVEMENT** être réalisé au minimum 30 minutes après la dernière prise de boisson, d'aliments, de cigarette / e-cigarette, d'un brossage de dents ou d'un rinçage bucco-dentaire.

1. Ouvrir le kit contenant le Tube n°1 et l'entonnoir
2. Identifier **OBLIGATOIREMENT** ce tube avec l'étiquette fourni par le laboratoire en notant vos **NOM, NOM DE NAISSANCE, PRENOM** et **DATE DE NAISSANCE** en collant l'étiquette à la verticale du tube
3. Fixer l'entonnoir sur le tube

Tube n°1 →



4. Saliver (pas de crachat) au maximum 1 mL dans l'entonnoir (environ 1 cm, salive représentée en rouge sur la photo)



5. Verser le contenu du Tube n°2 dans l'entonnoir, doucement de façon à ne pas faire déborder le tube



6. Jeter ensuite le Tube n°2
7. Enlever délicatement l'entonnoir et fermer le Tube n°1 avec le bouchon bleu
8. Placer ce tube dans le sachet fourni et le sceller. Placer ce sachet dans le sachet de transport 95 kPa