

## Objectif:

Prélèvement d'un échantillon sanguin en vue d'un examen d'hématocytologie.

## Matériel:

Adulte : Tube VACUETTE EDTA 3ml

Bébés et jeunes enfants: possibilité d'utiliser un Tube MINICOLLECT EDTA 0.5ml

## Prélèvement :

Identifier le flacon avec les nom et prénom et préciser la date et l'heure du prélèvement

Le flacon doit être conservé à **15-25°C** et acheminé rapidement au laboratoire.

## Cas particulier: Numération plaquettaire sur sang veineux prélevé sur Tube CITRATE:

Quand ? Thrombopénie connue ou Agrégation plaquettaire sur EDTA

Prélever en plus un Tube VACUETTE CITRATE 3,5ml

Mettre une pastille verte sur le bouchon pour signaler à la technique de ne pas centrifuger le tube + bon vert.