

MATERIEL DE PRELEVEMENT SANGUIN

Le matériel de prélèvement à disposition

Le laboratoire met à la disposition des prescripteurs, préleveurs et des infirmières, du matériel et des consommables conformément aux exigences réglementaires (Stérile, à usage unique, non périmé).

Il est de la responsabilité du préleveur :

- De vérifier les dates de péremptions du matériel de prélèvement avant leur utilisation.
- De respecter la température de stockage du matériel de prélèvement (4-25°C) et d'éviter les chocs thermiques préjudiciables à la bonne conservation des additifs contenus dans les tubes (anticoagulant...).

Il est recommandé de stocker dans votre véhicule le minimum de boîtes de prélèvement non utilisées.



Prélèvements sanguins

Les tubes de prélèvements sont conditionnés dans des boîtes de transport individuelles, conformes à la législation.

1 BOITE = 1 PATIENT

Chaque boîte est à l'usage exclusif d'un seul patient. Ne jamais grouper à l'intérieur d'une même boîte les échantillons provenant de patients différents. Nous fournissons des boîtes de prélèvement standard contenant:

- Un kit de tubes de prélèvement standard,
- Deux aiguilles (1 verte et 1 noire)
- Un corps de pompe sécurisé
- Un Kit de prélèvement : lingette-coton-pansement
- Une fiche de prélèvement externe
- Une liste simplifiée des analyses les plus courantes et tubes associés

Toutes nos boîtes de prélèvements sont étiquetées avec une date de péremption du tube qui périmera le plus tôt.