




Transfert dans les plus brefs délais sur milieux de transport.
Délai avant transfert 12h entre 2 et 8 °C

Port de gants obligatoire

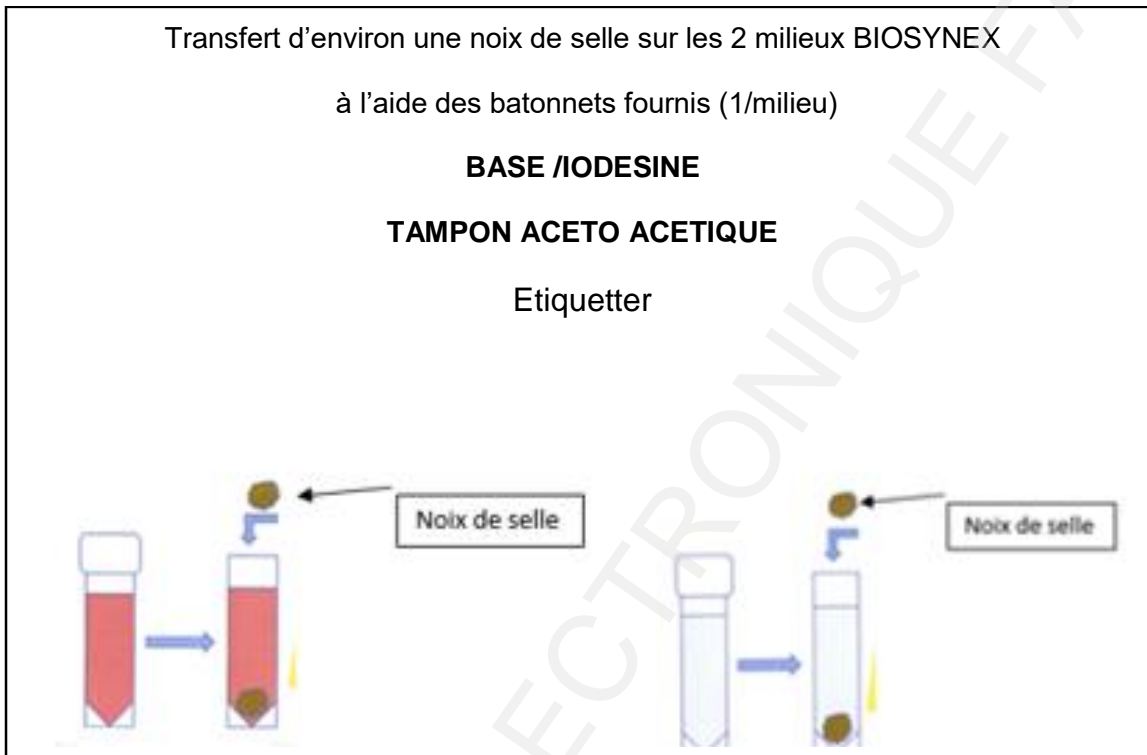

ENVOYER FLACON DE SELLES (examen macroscopique) + 2 MILIEUX de transport
Conservation de la selle et des 2 milieux entre 2 et 8 °C en l'attente de transfert.
Acheminer dans les 72h au laboratoire .

Remarque :

Le laboratoire ne réalise pas la recherche de cryptosporidies et microsporidies.
Le laboratoire ne réalise pas le test de Baermann.

Les milieux pour la conservation des parasites sont fournis par le laboratoire exécutant et peuvent être commandés par téléphone auprès du LABM AQUIBIO au **0558909181** (service microbiologie).