

RECOMMANDATIONS PRELEVEMENTS RECHERCHE DE PORTAGE DE BACTERIE MULTI RESISTANTE

PRE-INS-022

Version 1 mise en application le 17/12/2019

Nous vous remercions de respecter les recommandations suivantes :

Préciser la bactérie multi résistante à rechercher :

S aureus résistant à la méticilline (SARM),

Entérobactéries productrices de Blactamases à spectre élargi (BLSE),

Entérocoques résistants à la vancomycine (ERV),

Entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC).

Consommables nécessaires

Ecouvillon ELITECH avec milieu de transport bouchon VIOLET

Prélèvement:

BLSE, ERV, EPC:

- Ecouvillonnage rectal de préférence
 Il faut récupérer sur l'écouvillon des matières fécales en abondance, visibles à l'œil.
 - 1 écouvillon par recherche de BMR.
- · Selles possible.

SARM:

- Ecouvillonnage au niveau du nez (un seul écouvillon pour les 2 narines),
- Ecouvillonnage des yeux (2 écouvillons distincts),
- Ecouvillonnage des aisselles, du périnée, ...

Identifier l'écouvillon avec Nom, Prénom, Date De Naissance.

Noter la date, l'heure du prélèvement, l'origine et les renseignements cliniques et thérapeutiques.

- Patient source?
- Patient contact?

Conservation pré-analytique :

Température ambiante, 48h