



**Nous vous remercions de respecter les recommandations suivantes :**

- Préciser la bactérie multi résistante à rechercher :
  - S aureus résistant à la méticilline (**SARM**),
  - Entérobactéries productrices de Bactamases à spectre élargi (**BLSE**),
  - Entérocoques résistants à la vancomycine (**ERV**),
  - Entérobactéries productrices de carbapénémases (**EPC**).

Consommables nécessaires

- Ecouvillon Eswab COPAN **bouchon ROSE**

Prélèvement :

**BLSE, ERV, EPC :**

- Ecouvillonnage rectal de préférence  
**Il faut récupérer sur l'écouvillon des matières fécales en abondance, visibles à l'œil.**  
1 écouvillon **par recherche de BMR.**
- Selles possible.

**SARM :**

- Ecouvillonnage au niveau du nez (un seul écouvillon pour les 2 narines),
- Ecouvillonnage des yeux (2 écouvillons distincts),
- Ecouvillonnage des aisselles, du périnée, ...

1/ Décharger l'écouvillon **bouchon ROSE** dans le milieu de transport et rompre la tige au point de rupture.

2/ Identifier l'échantillon avec Nom, Prénom, Date De Naissance.

3/ Noter la **date**, l'**heure** du prélèvement, l'**origine** et les **renseignements cliniques et thérapeutiques**.

- Patient source ?
- Patient contact ?

Conservation pré-analytique :

A 2-8°C :

- Ecouvillon **bouchon ROSE** ≤ 48h