



## **Unilabs | Interlabo**

### **Préconisations patient recueil de salive pour recherche du SARS-COV-2 par PCR**

**Attendre au moins 1 heure** après la prise d'un repas, d'une boisson ou du brossage des dents.

**Le sachet de prélèvement** contient :

- ✓ Le kit de prélèvement salivaire contenant un tube vide gradué avec un entonnoir.
- ✓ Un sachet de transport.
- ✓ Une fiche de renseignements cliniques « PRE-ENR-037 Feuille de demande d'examen COVID 19 ».
- ✓ Un tube contenant 1mL de milieu de transport « sample storage reagent ».

#### **Protocole de prélèvement**

- 1- **Remplir lisible et intégralement la fiche** « PRE-ENR-037 Feuille de demande d'examen COVID 19 ».
- 2- **Se laver les mains** soigneusement.
- 3- Ouvrir le kit de prélèvement salivaire et **introduire l'entonnoir dans le tube.**
- 4- **Faire saliver le patient** et lui demander de laisser couler la salive dans l'entonnoir.



- 5- Répéter l'opération jusqu'à obtenir **un volume d'environ 1mL.**
- 6- Verser la **totalité du milieu de transport** dans l'entonnoir.
- 7- Enlever l'entonnoir et le jeter dans une poubelle.



- 8- **Fermer le tube en vissant correctement le bouchon rouge.**



- 9- Identifier le tube avec le **nom, prénom et date de naissance** du patient.
- 10- Mettre le tube dans le sac de transport, fermer ce sachet avec la bande adhésive.
- 11- Placer la fiche « PRE-ENR-037 Feuille de demande d'examen COVID 19 » dans la poche kangourou du sachet.
- 12- **Conserver le sachet concernant le prélèvement au réfrigérateur** jusqu'au dépôt au laboratoire ou à la pharmacie qui doit être fait **le plus rapidement possible.**